



GUIDE DE RÉFÉRENCE

1

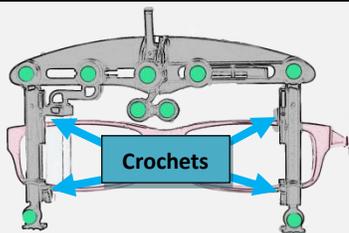


Étirez les pieds où les crochets sont placés en tenant le bas du pied de l'EY-stick. Insérez la monture entre les crochets, puis refermez les crochets en vous assurant que l'EY-stick est centré sur la monture.

2

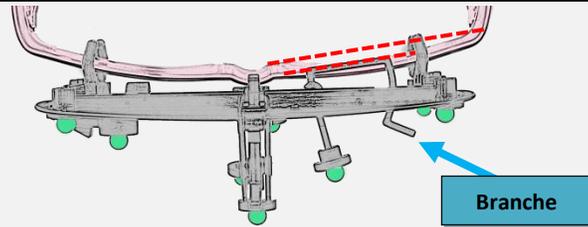

En regardant de haut, bougez la branche en avant et en arrière jusqu'à ce qu'elle devienne parallèle avec la cambrure de la monture. Cela mesurera la cambrure de la monture.

3

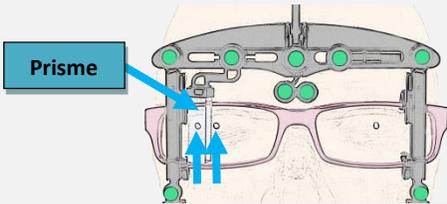

Déverrouillez la pendule en levant le loquet et demandez au client de porter sa monture avec l'appareil EY-Stick. Simplement bougez le prisme pour le positionner du côté temporel de l'iris jusqu'à ce que le reflet de la pupille dans le centre du prisme soit visible.

4



Demandez au client de regarder un objet au loin en utilisant sa posture naturelle. Le client peut être debout ou assis. Tenez-vous à côté du client et appliquez un peu de pression sur le loquet pour le verrouiller.

5


Assurez-vous que l'appareil EY-stick et la monture du patient sont entièrement visibles dans le rectangle bleu de la vidéo. ①

Placez le client dans sa posture naturelle en lui demandant de suivre les instructions suivantes:

- Lever ou baisser son menton afin que les deux billes nasales vertes soient alignées horizontalement. ②
- Tourner sa tête vers la gauche et la droite afin que l'indicateur de rotation ne soit pas visible. ③

Alternativement, la tablette peut être tournée et bougée par l'utilisateur pour recréer la posture naturelle.


INCLINAISON INCORRECTE

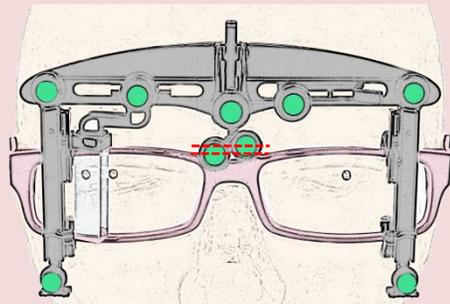

Problème: Billes nasales vertes non alignées.
Résolution: Demandez au client de lever ou baisser son menton afin que les 2 billes nasales vertes soient alignées horizontalement.




ROTATION INCORRECTE

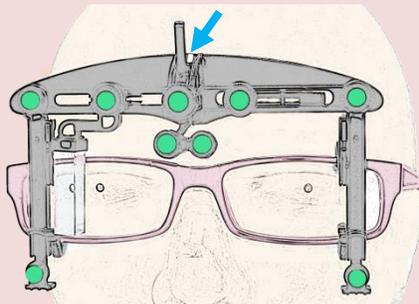

Problème: Indicateur de rotation blanc visible.
Résolution: Demandez au client de tourner sa tête vers la gauche ou la droite afin que l'indicateur de rotation ne soit pas visible.



① PLACEMENT CORRECT

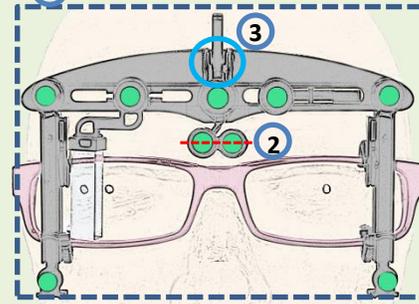


- L'appareil EY-stick et la monture du client sont entièrement visibles dans le rectangle bleu de la vidéo.
- Les deux billes vertes de la pendule sont alignées horizontalement.
- Il n'y a pas de rotation (l'indicateur de rotation n'est pas visible).

Demandez au client de fixer la lentille de la caméra et attendre la lumière du flash.


Tenez l'iPad sans le secouer jusqu'à ce que la photo soit prise. Appuyez sur le bouton « Prendre Photo ».

6

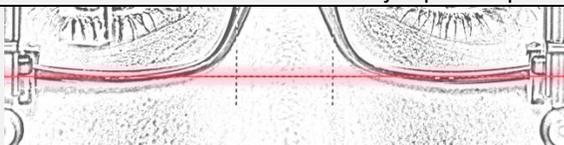

Vérifiez que la ligne horizontale est bien placée au bas de la lentille.

7

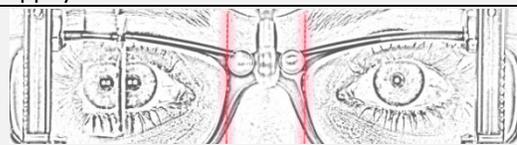

Vérifiez que les lignes verticales sont bien placées entre la lentille et la monture.


8



Vérifiez que les curseurs sont bien placés sur le reflet cornéen.

Notez: la réflexion nasale doit être utilisée sur le côté du prisme.


OPTIONNEL

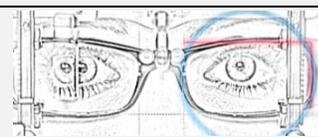


Alignez les lignes pour les mesures de la monture sur les côtés supérieurs et temporaux de la lentille gauche. Ajustez le diamètre effectif afin de créer le plus petit cercle qui couvre la lentille.

GUIDE DE RÉFÉRENCE


Ajustement de l'Eye-Stick pour des montures avec une large côte B

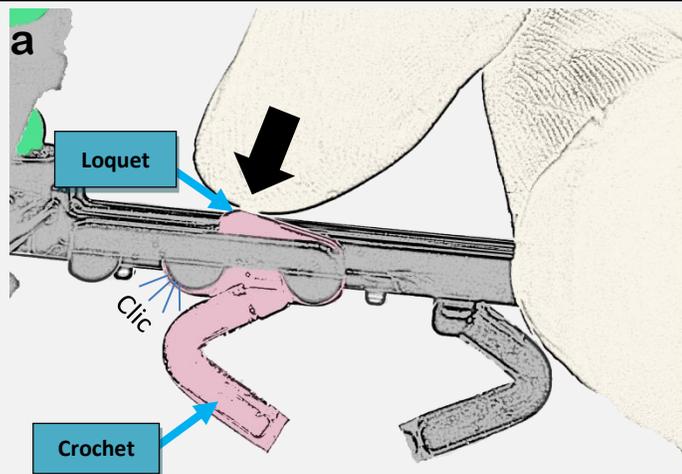


Déverrouillez les crochets en poussant sur le loquet à l'aide de votre doigt. Vous entendrez un clic quand le crochet est déverrouillé.

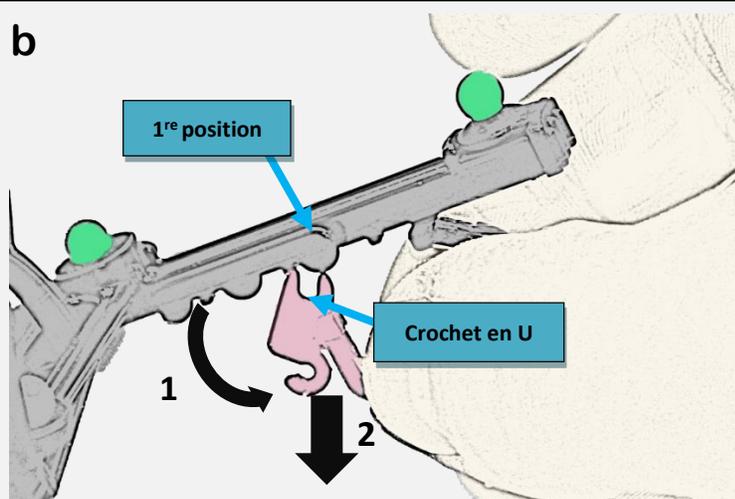

1. Faites pivoter le crochet jusqu'à sa position de retrait.
2. Retirez le crochet en U de la première position.

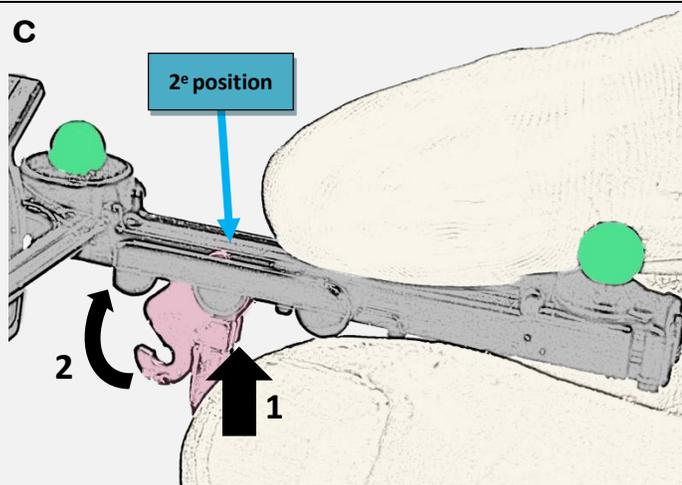

1. Dirigez le crochet en U vers la deuxième position.
2. Faites pivoter le crochet jusqu'à sa position de verrouillage.

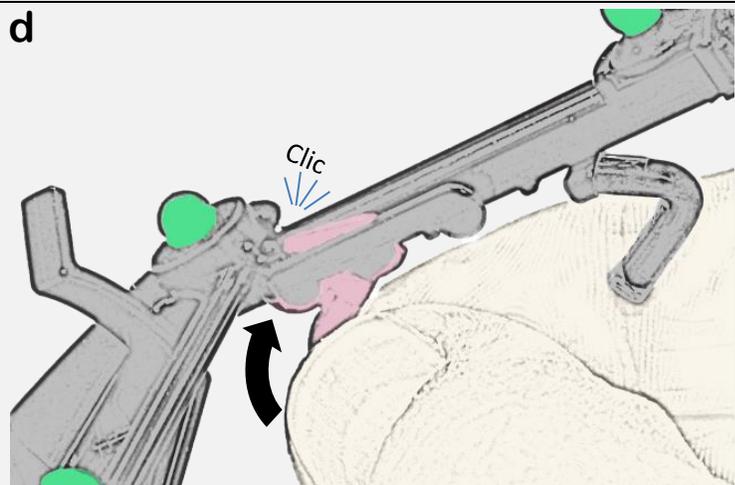

Verrouillez le crochet en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

IMPORTANT: Au moment du verrouillage, tenez fermement le crochet par les côtés avec votre pouce et votre index.

Ne verrouillez jamais le crochet en appuyant simplement dessus.

